

Het recept voor een perfecte afdruk.



Van poeder naar pasta

Stap A

Bewaar het alginaat in de licht- en luchtdichte Cavex bewaarcontainer. Zo is het altijd in top conditie. Roer het alginaatpoeder eerst goed los.

aanbevolen dosering bovenkaak



aanbevolen dosering onderkaak



Stap B

Strijk het Cavex maatschepje af voor de juiste hoeveelheid poeder. Doseer hierbij de juiste hoeveelheid water op kamertemperatuur uit de Cavex doseerflacon.

Stap C

Poeder en water in de flexibele Cavex mengnap. 10 seconden roeren tot al het water is opgenomen. Daarna met de spatel stevig tegen de flexibele wand strijken, tot alle klontjes er uit zijn en de pasta mooi glad is.



Cavex alginateen en accessoires worden geleverd door uw dental depot.


Voor nadere informatie over productsamenstelling en -toepassingen kunt u contact opnemen met Cavex, +31 23 530 77 00 - Dental Customer Service, of www.cavex.nl

Cavex Holland BV
Harmenjansweg 19
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem
The Netherlands
T +31 23 530 77 00
F +31 23 535 64 82
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

Van pasta naar afdruk


Stap D

Vul de lepel met de alginaatpasta, geef in de volle lepel de occlusie aan met een bevochtigde vinger.

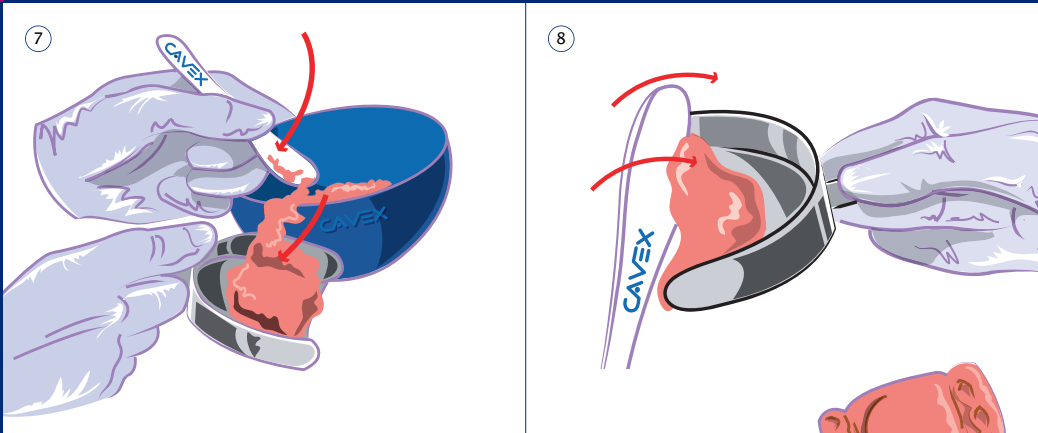


Stap E

De tandarts plaatst de lepel in de mond, laat de pasta uitharden en trekt de lepel met één snelle en soepele beweging weer uit de mond van de patiënt.

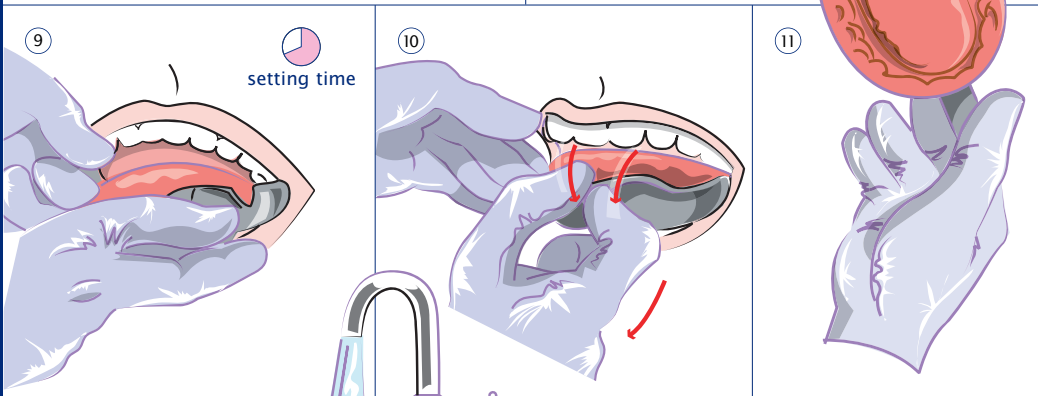

Stap F

Lepel met afdruk afspelen onder koud water en overtollig water afslaan. De afdruk desinfecteren. Daarna opnieuw afspelen en op de hand afslaan.

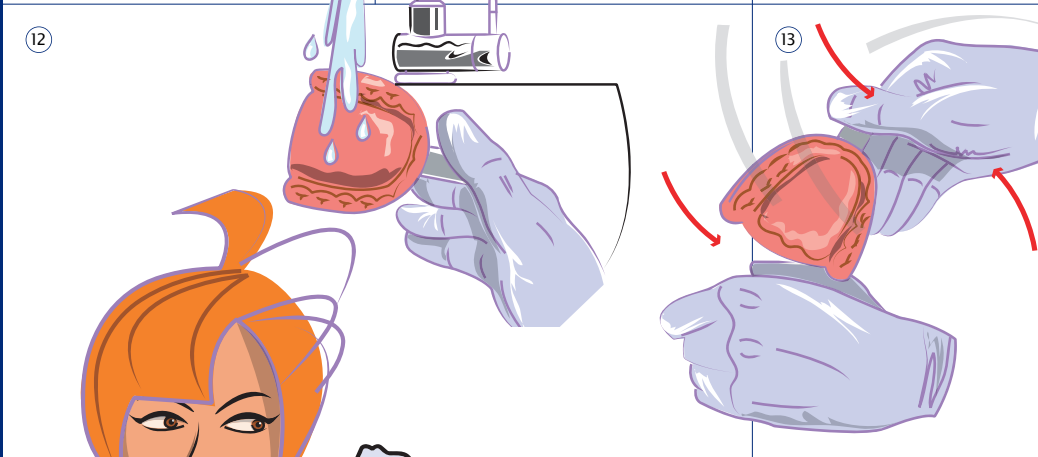

En dan de laatste stap, naar het lab.

Doe de lepel met de nog vochtige afdruk in een plastic zakje, zonder toevoeging van water, natte watten of andere bevochtigers. Sluit het zakje luchtdicht af, zodat de luchtvochtigheid behouden blijft.

