

Cavex Alginate Mixer 3

Anleitung

Vor dem Mischen immer von Hand kurz vorrühren!

Der Cavex Alginate Mixer 3 verkürzt die Aushärtungszeit um 45 bis 60 Sekunden.

Programm	M1	M2	M3	M4
Matereigenschaften	Extra Fast Set	Fast Set	Normal Set	Gips
Materialmenge	1 - 4 Löffel	3 - 4 Löffel	3 - 4 Löffel	75 gramm*
Maximum rotatiesnelheid	3.200 U/min	3.200 U/min	3.200 U/min	2.200 U/min
Programphasen	Schneller start - 6 s mischen - Schneller stopp - Ende	Schneller start - 8 s mischen - Langsamer stopp - Ende	Langsamer start Premix 8 s mischen - Langsamer stopp - Ende	Schneller start - 8 s mischen - Schneller stopp - Ende

* Dosieren nach Angabe des Herstellers und 10 s vorrühren, so dass das gesamte Pulver mit Wasser in Berührung kommt.