

# Cavex Alginate Mixer 3

## Instructions

***Toujours pré-mélanger à la main avant de mélanger !***

Cavex Alginate Mixer 3 réduit la durée de durcissement de 45 à 60 secondes.

Programme	M1	M2	M3	M4
Caractéristiques matériau	Ultra rapide	Rapide (Fast Set)	Normal (Normal Set)	Plâtre
Volume matériau	1 - 4 cuillères	3 - 4 cuillères	3 - 4 cuillères	75 grammes*
Vitesse de rotation max.	3.200 tr/min	3.200 tr/min	3.200 tr/min	2.200 tr/min
Phases de programme	Démarrage rapide - Mixage 6 sec. - Arrêt rapide - Fin	Démarrage rapide - Mixage 8 sec. - Arrêt lent - Fin	Démarrage lent Prémélange Mixage 8 sec. - Arrêt lent - Fin	Démarrage rapide - Mixage 8 sec. - Arrêt rapide - Fin

\* Dosage selon spécifications du fabricant et 10 sec. de pré-mélange pour que toute la poudre soit au contact de l'eau.

