


Cavex SiliconA para impresiones funcionales e impresiones monofásicas
Impresión funcional (tipo masilla e inyectable)

- 1)  Aplique Cavex SiliconA Adhesive (adhesivo) en la cubeta individual.
- 2)  Aplique una tira de Cavex SiliconA Putty (masilla). Relación de mezcla 1 : 1
- 3)  Masajee las mejillas y los labios para moldear el margen funcional.
- 4)  Tome la impresión de los márgenes funcionales.
- 5)  Los márgenes funcionales determinan ahora la extensión de los músculos y ligamentos.
- 6)  Aplique Cavex SiliconA Adhesive (adhesivo).
- 7)  Aplique Cavex SiliconA Injection Type (inyectable) en la cubeta y tome la impresión.
- 8)  Retire la impresión de la boca. Desinfecte la impresión (3 min. en Cavex ImpreSafe)

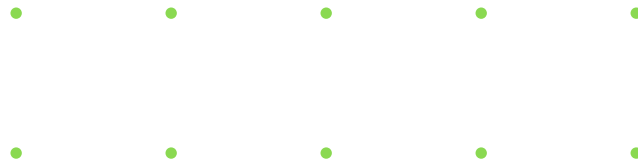



Cavex SiliconA para impresiones funcionales e impresiones monofásicas
Impresión monofásica (alta consistencia)

- 1)  Situación del implante.
- 2)  Ajuste la cubeta individual.
- 3)  Aplique Cavex SiliconA Adhesive (adhesivo) en la cubeta individual.
- 4)  Aplique una tira de Cavex SiliconA Putty (masilla).
Relación de mezcla 1 : 1
- 5)  Masajee las mejillas y los labios para tomar la impresión de los márgenes funcionales.
- 6)  Llene la cubeta con Cavex SiliconA Heavy Body (alta consistencia).
- 7)  Aplique Cavex SiliconA Heavy Body (alta consistencia) alrededor de los implantes.
- 8)  Coloque la cubeta en la boca.
- 9)  Retire la impresión de la boca. Desinfecte la impresión (3 min. en Cavex ImpreSafe)

