


## Cavex SiliconA pour impressions fonctionnelles et monophasé

### Impressions fonctionnelles (type Putty & Injection)

- 1)  Appliquez Cavex SiliconA Adhesive sur le porte-empreinte individuel.
- 2)  Appliquez une bande de Cavex SiliconA Putty. Proportion de mélange 1: 1
- 3)  Massez les joues et les lèvres pour former la marge fonctionnelle.
- 4)  Prenez une empreinte des marges fonctionnelles.
- 5)  Les marges fonctionnelles déterminent à présent l'étendue des muscles et des ligaments.
- 6)  Appliquez Cavex SiliconA Adhesive.
- 7)  Appliquez Cavex SiliconA type Injection sur le porte-empreinte et prenez l'empreinte.
- 8)  Retirez l'empreinte de la bouche et désinfectez-la (3 minutes dans Cavex ImpreSafe)

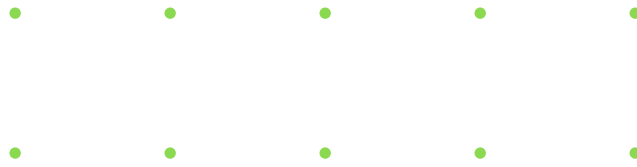



## Cavex SiliconA pour empreintes fonctionnelles et monophasé

### Empreinte monophasé (Heavy Body)

- 1)  Situation des implants.
- 2)  Ajustez le porte-empreinte individuel.
- 3)  Appliquez Cavex SiliconA Adhesive sur le porte-empreinte individuel.
- 4)  Appliquez une bande de Cavex SiliconA Putty. Proportion de mélange 1 : 1
- 5)  Massez les joues et les lèvres et prenez une empreinte des marges fonctionnelles.
- 6)  Remplissez le porte-empreinte de Cavex SiliconA Heavy Body.
- 7)  Appliquez Cavex SiliconA Heavy Body autour des implants.
- 8)  Positionnez le porte-empreinte dans la bouche.
- 9)  Retirez l'empreinte de la bouche et désinfectez-la (3 minutes dans Cavex ImpreSafe)

