


Cavex SiliconA para impresiones de un paso (técnica sándwich)

Tipo masilla e inyectable

- 1)  Aplique Cavex SiliconA Adhesive (adhesivo) en una cubeta individualizada.
- 2)  Aísle y coloque el hilo de retracción.
- 3)  Mezcle el Cavex SiliconA Putty (masilla).
Relación de mezcla 1 : 1
- 4)  Amase hasta obtener un color homogéneo.
Coloque la masilla mezclada en una cubeta.
- 5)  Aplique Cavex SiliconA Injection Type (inyectable) alrededor de la zona preparada.
- 6)  Posicione la cubeta firmemente, manténgala inmóvil y sin presión hasta que el material haya fraguado.
- 7)  Retire la impresión de la boca. Desinfecte la impresión (3 min. en Cavex ImpreSafe)

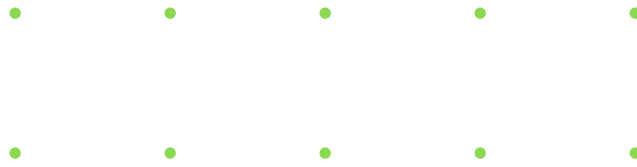



Cavex SiliconA para impresiones de un paso (técnica sándwich)

Tipo alta consistencia e inyectable



Decoloración en el incisivo central e incisivo lateral.



Prepare el diente.



Aísle y coloque el hilo de retracción.



Aplique Cavex SiliconA Injection Type (inyectable) alrededor del diente preparado.



Aplique Cavex SiliconA Adhesive (adhesivo) en una cubeta. Llene la cubeta individualizada con Cavex SiliconA Heavy Body (alta consistencia). Posicione la cubeta firmemente y manténgala inmóvil.



Retire la impresión de la boca. Desinfecte la impresión (3 min. en Cavex ImpreSafe)

