

Cavex Alginate Mixer 3

Protokoll

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands
T +31 23 530 77 00
dental@cavex.nl
www.cavex.nl



1. Geben Sie die richtige Dosierung Alginat und Wasser in den Mischbecher.



2. Rühren Sie kurz vor, um den Mischbecher einfacher reinigen zu können und zur Schonung des Mixers.



3. Schließen Sie den Mischbecher sorgfältig, indem Sie den Deckel im Uhrzeigersinn zudrehen.



4. Bringen Sie den Mischbecher im Mixer an und schließen Sie den Deckel.



5. Wählen Sie das Programm aus, drücken Sie auf Start und warten Sie, bis das Programm beendet ist.



6. Entnehmen Sie das gemischte Alginat mit einer Bewegung aus dem Mischbecher und bringen Sie sie im Abdrucklöffel an.

Wartung und Reinigung des Cavex Alginate Mixer 3:

Verhindern Sie die Verschmutzung des Mixers, indem Sie diesen regelmäßig reinigen. Wenn sich die Verschmutzung löst, kann diese in den Motor gelangen und diesen beschädigen.

1. Lösen Sie etwas Cavex GreenClean in einer Schale Wasser.
2. Befeuchten Sie ein Tuch (nicht zu nass!) mit der GreenClean-Lösung und reinigen Sie den Mixer.
3. Verwenden Sie den Rührstab mit dem feuchten Tuch, um schwer zu erreichende Stellen zu reinigen.



Empfohlene Dosierung Oberkiefer

Empfohlene Dosierung Unterkiefer

Zubehör

