

## Protocole de désinfection Cavex ImpreSafe

**Pour désinfecter les empreintes d'alginate, de polyéther et de silicone. Détruit les bactéries, les moisissures et les virus**

**Proportion de mélange: 30 ml. de désinfectant pour 1 l. d'eau**  
**Temps de contact: 3 minutes**




① Pressez le flacon pour remplir le gobelet doseur intégré à 30 ml.



② Remplissez le récipient d'eau jusqu'au repère (1 litre).  
 (voyez CONSEIL1)



③ Mélangez le désinfectant avec l'eau dans le récipient.

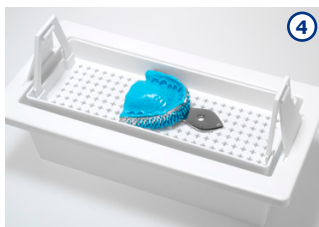

④ Placez l'empreinte sur le porte-empreintes dans le conteneur.



⑤ Plongez l'empreinte dans le liquide désinfectant pendant trois minutes.



⑥ Retirez le porte-empreintes du liquide désinfectant après trois minutes.



⑦ Rincez l'empreinte à l'eau courante.



⑧ Secouez le surplus d'eau de l'empreinte, placez-le dans un sachet hermétique et cochez «Désinfecté» sur le sachet.

**CONSEIL1:** Remplissez toujours le conteneur en premier avec l'eau, ensuite avec le désinfectant. Vous évitez ainsi la formation de mousse.

**CONSEIL2:** Renouvelez le liquide chaque semaine ou dès qu'il paraît trouble