

# Meilleures empreintes, moins de déformations

## Cavex Alginate Adhesive




### Propriétés et avantages:

- Améliore la liaison mécanique et chimique entre la porte-empainte et l'alginate.
- Meilleure qualité d'empreinte grâce à une déformation moindre lors de l'enlèvement de la porte-empainte de la bouche.
- Développé pour une utilisation avec l'alginate. Approprié aussi bien pour les porte-empaintes en métal qu'en plastique.
- Très facile à appliquer grâce à la combinaison du pinceau d'application dans le bouchon et de la couleur bleue évidente.
- L'application à l'aide d'un pinceau entraîne moins de vapeurs nuisibles que l'utilisation de sprays. Aucune mesure de ventilation nécessaire
- Minimum 50 applications par flacon.
- Résidus faciles à enlever au moyen d'alcool isopropylique ou d'éthanol (95%)

# Meilleures empreintes, moins de déformations

Cavex Alginate Adhesive Haftkraft in Kombination mit Cavex CA37.

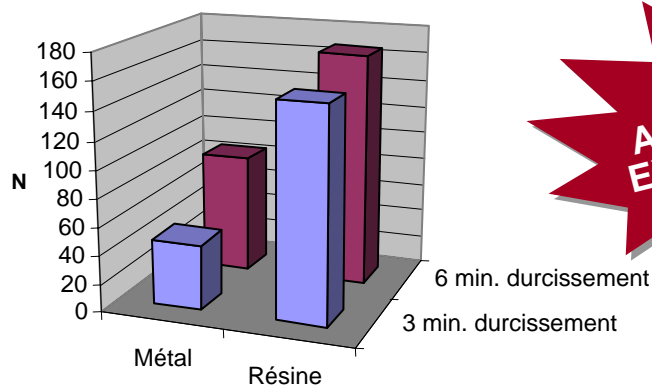

**ADHÉRENCE EXCELLENTE!**

	Métal	Résine
3 min. durcissement	47	151
6 min. durcissement	85	167

Pour plus de détails, consulter le document Cavex.



## Mode d'emploi:

1. Appliquez une fine couche d'adhésif sur la porte-empreinte. Attendez de 3 à 5 minutes.
2. Appliquez l'alginate.
3. Prenez l'empreinte comme d'habitude.
4. Éliminez les restes d'alginate avec Cavex GreenClean.
5. Éliminez les résidus d'adhésif au moyen d'alcool isopropylique ou d'éthanol (95%).

