



Betere afdrukken, minder vervorming

Cavex Alginate Adhesive




Eigenschappen en voordelen:

- Verbetert zowel mechanische als chemische verbinding tussen afdrukkelplaat en alginaat.
- Betere afdrukkwaliteit door verminderde vervorming wanneer afdrukkelplaat wordt verwijderd uit de mond,
- Speciaal ontwikkeld voor gebruik met alginaat. Geschikt voor zowel metalen als kunststof afdrukkelplaten.
- Zeer gemakkelijk aan te brengen door combinatie van applicatiekwastje in de dop en duidelijke blauwe kleur.
- Applicatie met kwastje geeft minder schadelijke dampen dan gebruik van sprays. Geen speciale ventilatiemaatregelen nodig.
- Minimaal 50 applicaties per flesje.
- Residue eenvoudig te verwijderen met isopropyl alcohol of ethanol (95%).



Betere afdrukken, minder vervorming

Cavex Alginate Adhesive kleefkracht in combinatie met Cavex CA 37.

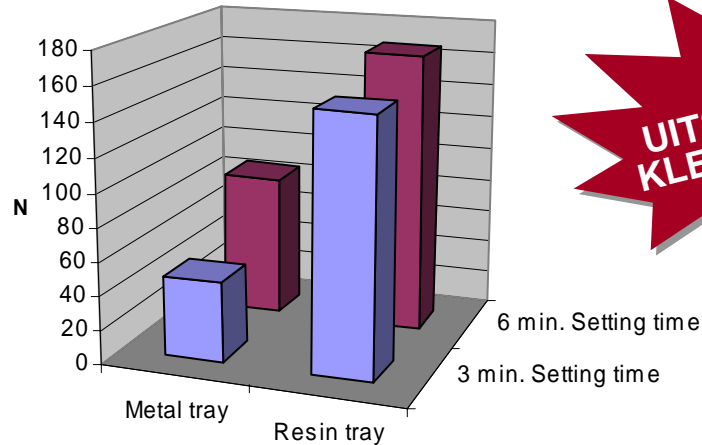

	Metal tray	Resin tray
3 min. Setting time	47	151
6 min. Setting time	85	167

Meer gedetailleerde informatie beschikbaar op file bij Cavex.



Gebruiksaanwijzing:

1. Breng een dun laagje adhesief aan op de afdruklepel. Wacht 3 tot 5 minuten.
2. Alginaat aanbrengen.
3. Neem afdruk zoals gebruikelijk.
4. Verwijder alginaatresten met Cavex GreenClean.
5. Verwijder residu adhesief in afdruklepel met isopropyl alcohol of ethanol (95%).

