



Viele Behandlungen und Arbeiten in der Zahnmedizin beginnen mit einer Abformung. Hochwertige Abformungen garantieren dem Zahnarzt ein erstklassiges Resultat. Cavex bietet ein vielfach eingesetztes und bewährtes Sortiment an Silikon Abformmaterialien und Zubehör, das perfekt auf den Bedarf der zahnärztlichen Praxis abgestimmt ist. Denn Ihr Erfolg liegt uns am Herzen.

*Your impression is
our concern*

Cavex SiliconA bite, einfach perfekt – das erste Mal, jedes Mal

Die Anfertigung einer präzisen Bissregistrierung sollte einfach Spaß machen. Das funktioniert aber nur, wenn das Material leicht zu verarbeiten ist, einfach zu beschneiden, und vor allem absolut genau.


Cavex SiliconA bite erfüllt "zumindest" alle diese Anforderungen. Es bietet kurze Verarbeitungs- und Abbindezeit von jeweils 30 sec. und eine Shore D Härte von 40. Dieser hohe Wert wird durch einen hohen Füllstoffgehalt erreicht. Er garantiert 100% Präzision.

Die Mischdüsenansätze schaffen eine gleichmäßige Materialschicht, die die Zahnreihe komplett abdeckt und so eine perfekte Bissregistrierung ermöglicht.





Jedes Detail wird wiedergegeben

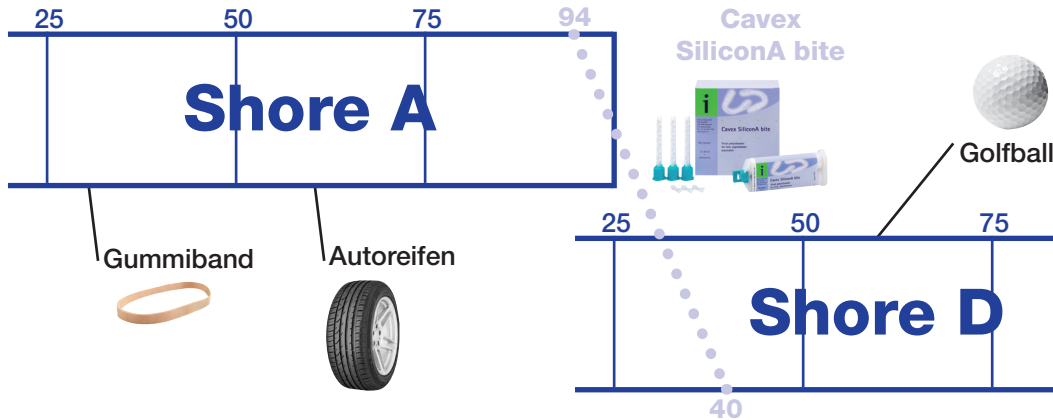

● **Überlegene Härte**

Die ShoreD Härte 40 entspricht einer ShoreD Härte von >94 und garantiert eine langfristig dimensionsstabile Bissregistrierung. Cavex SiliconA bite ist mit einem Skalpell oder einer Fräse leicht zu bearbeiten. Das freut auch den Zahntechniker.

● **Schnell**

Die Verarbeitungs- und Abbindezeiten von jeweils nur 30 sec. ermöglichen kurze und patientenfreundliche Stuhlzeiten und präzise Ergebnisse.

● **Ausgeprägt thixotrop**

Ein wichtiger Arbeitsschritt ist das Aufbringen des Materials auf die Zahnreihe. Die breiten flachen Ansätze von Cavex SilikonA bite bilden eine breite gleichmäßige Materialschicht, die sich leicht und genau auftragen lässt. Cavex SiliconA bite ist thixotrop. Das heißt, es ist leicht aufzutragen, ist aber anschließend sofort standfest. Das ermöglicht eine dauerhafte voll abdeckende Materialschicht.

● **Scanbar**

Cavex SiliconA bite ist aufgrund des hohen Füllungsgrades scanbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 04931 9809682 oder www.cavex-deutschland.de

● **Spezielle Mischdüsenansätze**



Bissregistrierungsansätze



Verschiedene Mischdüsen

Sortiment:

AS54 Cavex SiliconA bite

2 x 50ml Kartuschen