

Quadrant FiniSense: Prevención de la hipersensibilidad

- En cuellos de dientes sensibles
- Prevención y alivio de la sensibilidad postoperatoria


Razones por las que usar Quadrant FiniSense

- surte efecto a los 30 segundos
- efectivo durante 12 meses o más
- no deja película sobre la superficie
- es fácil de usar
- hasta 150 aplicaciones por envase



Modo de operación

⇒ Quadrant FiniSense cierra inmediatamente la dentina interior de los túbulos, evitando el flujo de líquidos entre éstos

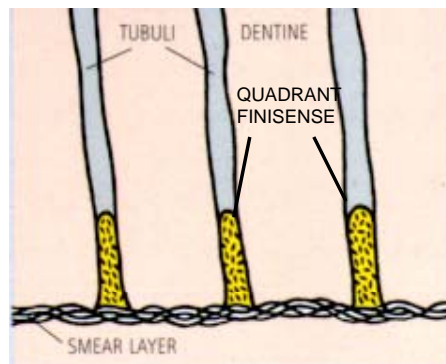


Resultado:

Prevención de la hipersensibilidad

Quadrant FiniSense


Primer desensibilizador

- En cuellos de dientes sensibles
- Prevención y alivio de la sensibilidad postoperatoria

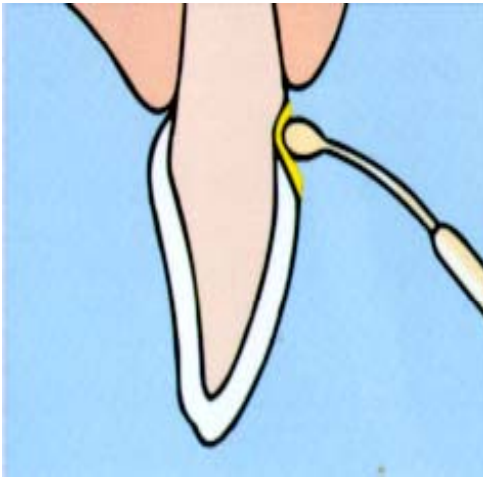

En cuellos de dientes sensibles

- Limpie la dentina (con piedra pómez, por ejemplo)
- Seque la superficie de la dentina cuidadosamente
- Aplique Quadrant FiniSense y deje que actúe durante 30 segundos
- Seque con un suave chorro de aire
- Enjuague a conciencia con agua

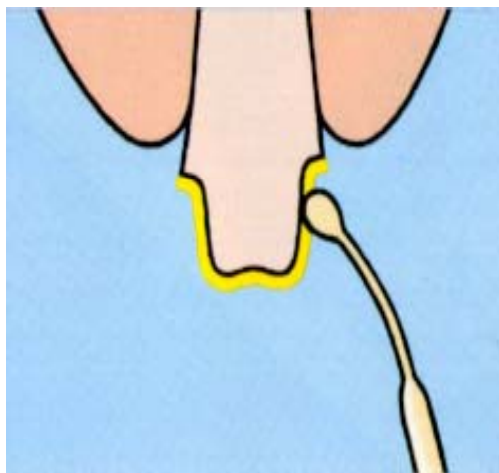

Prevención y alivio de la sensibilidad postoperatoria

- Seque la superficie de la dentina cuidadosamente
- Aplique Quadrant FiniSense y deje que actúe durante 30 segundos
- Seque con un suave chorro de aire
- Enjuague a conciencia con agua