

Quadrant FiniSense: voorkomt gevoeligheid

- Bij pijn door blootliggend dentine
- Preventie en verlichten van post-operatieve pijn na preparatie van kronen en inlays


Waarom Quadrant FiniSense?

- werkt binnen 30 seconden
- werkt 12 maanden of langer
- laat geen film op het oppervlak na
- eenvoudig in gebruik
- 150 applicaties per flesje



Hoe werkt het?

⇒ een onmiddellijke intradentinale afsluiting voorkomt vloeistofstromen in de tubuli

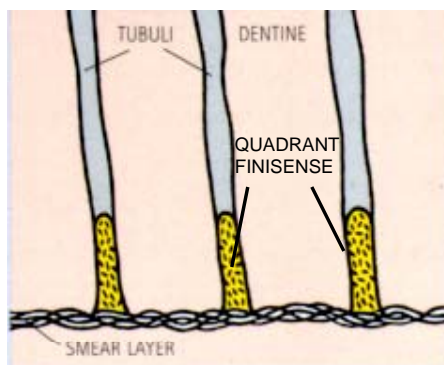


Resultaat:

voorkomen/verlichten van dentinegevoeligheid


Quadrant FiniSense Desensitizing Primer

- Bij pijn door blootliggend dentine
- Preventie en verlichten van post-operatieve pijn na preparatie van kronen en inlays

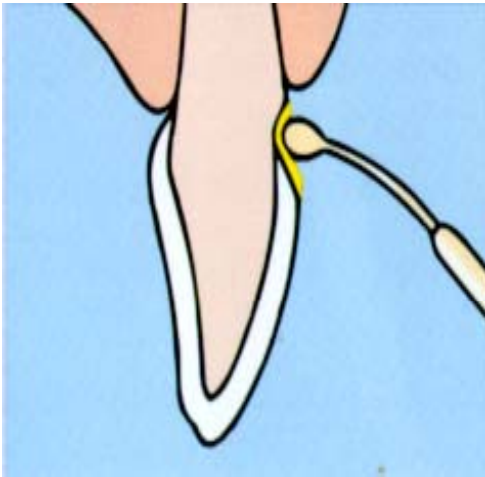

Voor directe vermindering van gevoeligheid

- Reinigen van dentine met bijvoorbeeld puimsteen
- Voorzichtig drogen van het dentine-oppervlak
- Quadrant FiniSense aanbrengen en 30 sec laten inwerken
- Zacht droog blazen
- Grondig spoelen met water

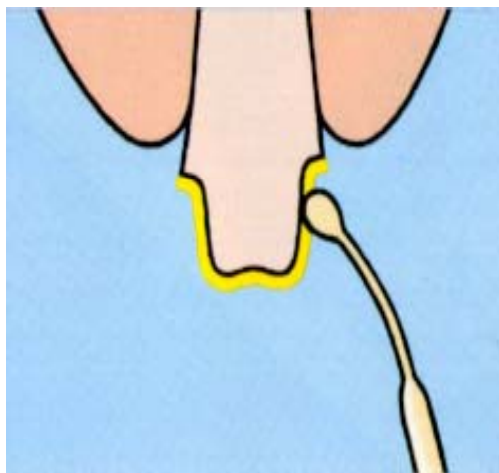

Voor preventie van post-operatieve gevoeligheid

- Voorzichtig drogen van het dentine-oppervlak
- Quadrant FiniSense aanbrengen en 30 sec laten inwerken
- Zacht droog blazen
- Grondig spoelen met water