

# CAVEX Bite&White

## ŽELITE LI SVJETLIJI I BISERNO BIJELI OSMIJEH?

### Preporučeno od strane stručnjaka

Cavex Bite&White je proizvod Cavex Holland BV, specijaliziranog proizvođača stomatoloških proizvoda s više od 100 godina iskustva. Cavex Bite&White profesionalan sustav za izbjeljivanje je opsežno testiran te je preporučeno od strane stomatologa i stručnjaka za izbjeljivanje. Cavex Bite&White sadrži 16% karbamid-peroksid, materijal koji je dokazan kao učinkovito sredstvo za izbjeljivanje. Učinkovit je bez štetnog utjecaja na vaše zube.

### Fluorid

Cavex Bite&White sadrži natrij-fluorid za jačanje zubne cakline. Također sadrži kalij-nitrat koji pomaže kod ublažavanja preosjetljivosti zubi. Mentol je dodan za ugodnu aromu u slučaju da materijal izađe iz kalupa. Kako bi se spriječili zdravstveni problemi, prije upotrebe Cavex Bite&White-a obavezne su konzultacije sa vašim stomatologom. Svi Cavex Bite&White materijali za izbjeljivanje su pH neutralni (pH = 6,2) i stoga sigurni za zube.

Kao dodatak setovima za pacijente, dostupni su i pojedinačni refili koji su dostatni za 10 izbjeljivanja.



### Više informacija

Vaš stomatolog pružit će Vam više informacija o Cavex Bite&White sustavu za izbjeljivanje.



- Siguran, učinkovit i jednostavan
- Vaš stomatolog će napraviti plan terapije i izbjeljivanje može početi
- Kućni sustav za izbjeljivanje zubi sa brzo vidljivim rezultatima

CAVEX  
Bite&White  
Profesionalan sustav za izbjeljivanje zubi

Cavex Holland BV  
PO Box 852  
2003 RW Haarlem  
[www.cavex.nl](http://www.cavex.nl)



Kućno  
izbjeljivanje  
zubi uz nadzor  
stomatologa.

pH-neutralan  
i siguran za  
Vaše zube

CAVEX  
Bite&White  
Profesionalan sustav za izbjeljivanje zubi

# Izbjelite svoje zube kod kuće sa Cavex Bite&White na siguran, učinkovit i jednostavan način.

## Biserno bijeli zubi

Lijepi bijeli zubi izgledaju atraktivno. To je nešto na čemu su drugi zavidni! Štoviše, bijeli zubi daju vam samopouzdanje. Dali ste znali da je danas vrlo jednostavno izbjeliti zube? Cavex Bite&White je novi i siguran proizvod za izbjeljivanje vaših zubi kod kuće. Cavex Bite&White djeluje brzo, jednostavan je za upotrebu i ponovo vam daje blistavo biseran osmijeh!

## Sigurno i učinkovito izbjeljivanje zubi

Većina ljudi u početku ima bespriječno bijele zube. Kava, čaj i ostala hrana i pića s vremenom potamnjuju zube. Ulogu u tome mogu imati nasljedni problemi sa zubima i upotreba lijekova.

Starenje također utječe na boju vaših zubi. Zaštitni sloj cakline na vašim zubima postaje sve tanji, te time omogućuje da nečistoće brže prodiru kroz njega čime slojevi relativno tamnijeg dentina još više postaju vidljivi. Očito rješenje je izbjeljivanje. Cavex Bite&White je razvijen u tu svrhu. Siguran i učinkovit način izbjeljivanja u kojemu se tretman ne odvija u ordinaciji. Sami odlučujete kada i gdje ćete obaviti tretman.\*

\* rezultati između ostalog ovise o razlozima promjene boje, jačini, općenitoj oralnoj higijeni i trajanju tretmana.

## Savjetujte se sa svojim stomatologom

Cavex Bite&White je dostupan isključivo u stomatološkim ordinacijama. Stomatolog će vas savjetovati dali je moguće izbjeliti vaše zube, ponuditi korisne savjete i obaviti vrlo važne pripreme radove kao što su pregled, poliranje i uklanjanje kamenca i naslaga sa vaših zubi. Vaš stomatolog može utvrditi trenutnu boju vaših zuba i sukladno vašim željama novu boju. Željena boja će biti baza za raspored izbjeljivanja.



Prije tretmana



Poslije tretmana

## Sigurno izbjeljivanje zubi sa udlagama po mjeri

Profesionalni otisak vaših zubi uzima se za izradu udlage koja savršeno pristaje vašim zubima. Udlaga za izbjeljivanje savršeno prijanja uz zub i umanjuje mogućnost da gel za izbjeljivanje dođe u kontakt sa vašim desnim. Gel za izbjeljivanje može uzrokovati iritaciju ili preosjetljivost. Vaš stomatolog će odrediti točnu količinu gela koji je potrebno koristiti.



Stomatolog će Vam dati transparentnu udlagu i aktivan gel za izbjeljivanje kod kuće.

## Nastavite izbjeljivanje kod kuće

Ukoliko se prvo konzultirate sa stručnjakom i dopustite mu da obavi pripreme radove možete biti sigurni da će te uz minimalni rizik dobiti maksimalne rezultate. Nastavite tretman izbjeljivanja kod kuće. Na kraju uz pomoć ključa boja možete usporediti finalne rezultate sa početnom bojom zuba.



## Koliko često je preporučljivo izbjeljivati zube?

Postupak izbjeljivanja se određuje konzultacijama sa vašim stomatologom. Postići ćete najbolje rezultate sa Cavex Bite&White ukoliko izbjeljujete barem jedan sat dnevno tijekom 10-ak uzastopnih dana. Tijekom dana možete izbjeljivati kada god vama odgovara!



**Preporučeno od strane stomatologa i dentalnih higijeničara**

Za optimalne rezultate prije izbjeljivanja potrebno je napraviti kontrolu Vaših zuba, ukloniti kamenac, a potom ispolirati.