

Recommandé par les professionnels

Cavex Bite&White est un produit de Cavex Holland, un fabricant spécialisé dans les produits dentaires, comptant plus de 100 ans d'expérience. Le système Cavex Bite&White Professional Dental Whitening System a été préalablement testé et recommandé par les dentistes et les hygiénistes dentaires. Cavex Bite&White contient du peroxyde de carbamide à 16 %, un matériau qui a fait ses preuves en tant qu'agent de blanchiment et qui est efficace sans attaquer vos dents.

Fluoride

Cavex Bite&White contient du fluorure de sodium, qui renforce l'émail. Il contient aussi du nitrate de potassium, efficace contre la sensibilité. La menthe ajoutée procure un goût agréable au cas où un peu de produit s'échapperait de la gouttière. Pour éviter tout problème buccal ou de santé et pour pouvoir utiliser Cavex Bite&White, il est indispensable de consulter un dentiste ou un hygiéniste dentaire compétent avant le traitement. Tous les matériaux de blanchiment Cavex Bite&White sont formulés à un pH neutre (pH = 6,2), par conséquent sans danger pour vos dents.

À côté du kit patient, il existe aussi une recharge, qui permet d'effectuer environ dix blanchiments.



Plus d'informations

Votre dentiste pourra vous donner des informations plus détaillées sur Cavex Bite&White.



CAVEX BITE&WHITE

Dents sensibles ?

NOUVEAU! Cavex Bite&White ExSense Conditionneur dentaire

Cavex Bite&White ExSense est un conditionneur dentaire à utiliser à domicile qui **élimine la sensibilité dentaire** et contribue à prévenir une nouvelle sensibilité. Il rend la surface des dents lisse et brillante, ce qui leur donne un aspect plus blanc.

Cavex Bite&White ExSense est aussi idéal pour une utilisation après le blanchiment de vos dents. Cet agent conditionneur élimine une éventuelle sensibilité **et aide vos dents à se rétablir rapidement.**

Demandez à votre dentiste si vous aussi, vous pouvez utiliser Cavex Bite&White ExSense.



CAVEX
Bite&White
Professional Dental Whitening System

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
www.cavex.nl

ENVIE D'UN SOURIRE ÉCLATANT DE BLANCHEUR ?



Blanchiment
à la maison
sous contrôle
de votre
dentiste

pH neutre,
donc sans
danger pour
vos dents !

CAVEX
Bite&White
Professional Dental Whitening System

Blanchissez vos dents chez vous avec Cavex Bite&White. Un procédé sûr, efficace et facile !

Des dents blanches éclatantes

De belles dents blanches sont agréables à regarder. Et font envie ! Des dents éclatantes renforcent en outre la confiance en soi. Savez-vous qu'il est à présent très facile de blanchir vos dents ? Vous disposez pour cela de Cavex Bite&White, un produit sûr pour blanchir vos dents chez vous. Cavex Bite&White fonctionne rapidement, est facile à utiliser et vous redonne un sourire éclatant !

Procédé sûr et efficace pour le blanchiment des dents

La plupart des gens commencent leur vie avec une dentition d'une blancheur impeccable. Mais au fil des ans, sous l'effet du café, thé et autres produits alimentaires, les dents se décolorent. La consommation de médicaments ou des problèmes dentaires héréditaires peuvent aussi jouer un rôle.

Et il faut bien aussi reconnaître que l'âge a une influence sur la couleur des dents. L'émail protecteur de vos dents devient plus mince. De ce fait, les colorants peuvent pénétrer encore plus vite et la dentine sous-jacente, relativement plus foncée, devient plus apparente.

Une solution évidente consiste à blanchir les dents. Pour cela, nous avons conçu Cavex Bite&White. Un produit de blanchiment sûr et efficace. Le traitement n'a pas lieu dans une clinique ou chez le dentiste. Vous l'effectuez vous-même, où et quand vous le souhaitez. Vous aussi, vous pouvez avoir de belles dents blanches, celles dont vous avez toujours rêvé.*

* Le résultat dépend entre autres de la nature de la décoloration, de l'intensité, de l'hygiène buccale générale et de la durée du traitement.

Consultez votre dentiste

Seul un praticien dentaire peut vous fournir Cavex Bite&White. Avant de blanchir vos dents, il est préférable de consulter votre dentiste. Celui-ci pourra vous informer correctement sur les possibilités de blanchir vos dents, vous donner des conseils utiles mais aussi effectuer un travail préliminaire important : comme contrôler votre dentition, effectuer un polissage et un détartrage. Votre dentiste saura déterminer la couleur actuelle de vos dents et, en tenant compte de vos souhaits, déterminer une nouvelle couleur. Cette couleur sera ensuite la base pour le schéma de blanchiment.



Avant le traitement.



Après le traitement, un sourire d'une blancheur éclatante.

Tout commence par une gouttière bien ajustée

À partir d'une empreinte professionnelle de votre dentition, une gouttière bien ajustée est réalisée. Celle-ci suit avec précision les contours de vos dents et molaires. La gouttière épouse ainsi de façon optimale la forme de votre dentition, ce qui fait que le gel de blanchiment n'entrera pas ou pratiquement pas en contact avec vos gencives. Le gel peut provoquer localement une légère irritation ou réaction d'hypersensibilité. Votre dentiste vous indiquera exactement combien de gel vous devez utiliser.

Vous emporterez chez vous la (les) gouttière(s) transparente(s) et le gel de blanchiment.



Continuez le blanchiment à domicile

En consultant d'abord un spécialiste qui fera le travail préliminaire, vous limitez le risque au minimum tout en garantissant un résultat optimal. Vous pouvez continuer le blanchiment chez vous. La palette de couleur fournie, sur laquelle la couleur initiale est indiquée, vous permet de comparer les résultats obtenus.



Combien de fois devez-vous blanchir vos dents ?

Vous déterminez le schéma de blanchiment avec votre dentiste. Cavex Bite&White procure les meilleurs résultats si vous blanchissez vos dents au moins une heure par jour durant environ dix jours consécutifs. Vous pouvez effectuer ce blanchiment aux moments qui vous conviennent !

**Recommandé
par les dentistes
et les hygiénistes
dentaires**



Pour un résultat optimal, votre dentition est contrôlée au préalable et subit éventuellement un détartrage et un polissage.